

Dit document bevat informatie en richtlijnen voor het ter plekke vervangen van de SP-BLE voor een CO-Pilot-systeem. Deze instructies mogen alleen worden toegepast op een SP-BLE-set om een beschadigde, zoekgeraakte of niet-werkzame SP-BLE te vervangen.

LET OP: Het vervangingsproces kan niet ongedaan worden gemaakt zonder de betreffende systemen aan Nonin te retourneren voor service. Zorg dat de volgende stappen worden uitgevoerd op de beoogde D-HH.



Voor informatie over de werking van het systeem verwijzen we naar de bedieningshandleiding van het CO-Pilot-systeem.

Benodigde apparatuur:

Aanwezige apparatuur

- D-HH: te koppelen aan de nieuwe SP-BLE
- SP-BLE (oud): te vervangen (niet nodig bij verlies)



D-HH



SP-BLE

SP-BLE-vervangingsset

- SP-BLE (nieuw): te koppelen aan bestaande D-HH
- Downloadkabel
- USB-stick: bevat een nieuw configuratiebestand



SP-BLE



downloadkabel



USB-stick

Vorbereiding

1. Als u de oude SP-BLE hebt, zorg dan dat deze is uitgeschakeld.

OPMERKING: Knippen de lampjes, houd dan de aan-uitknop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

2. Zorg dat de nieuwe SP-BLE is uitgeschakeld.

OPMERKING: Knippen de lampjes, houd dan de aan-uitknop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

3. Stel vast welke D-HH aan de nieuwe SP-BLE moet worden gekoppeld.

OPMERKING: Dit kunt u nagaan door te controleren of het serienummer van de oude SP-BLE overeenkomt met het SP-BLE-serienummer dat tijdens het opstarten op de D-HH wordt weergegeven.



4. Sluit de meegeleverde USB-stick aan op de meegeleverde downloadkabel en sluit de downloadkabel aan op de D-HH die gekoppeld moet worden met de nieuwe SP-BLE..




Technische ondersteuning van Nonin Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië-Pacific:

Gratis: (800) 356-8874 (alleen VS en Canada)
Telefoon: +1 (763) 553-9968

Europa, Midden-Oosten, Afrika en India:

Telefoon: +31 (0)13 - 45 87 130


Vervangingsproces:

1. Schakel de D-HH in door op de aan-uitknop te drukken.
2. Houd de knop voor bestandsoverdracht  ingedrukt totdat het dialoogmenu verschijnt.



3. Druk op de optie 'New Configuration' ('Nieuwe configuratie') in het dialoogmenu. Er verschijnt een menu voor het selecteren van bestanden.

OPMERKING: Als onderaan het scherm de optie SELECT (selecteren) verschijnt, is dit niet correct. Druk op de terug-knop om terug te keren naar het opstartscherm van de CO-Pilot, druk op de aan-uitknop van de D-HH om deze in slaapstand te zetten en ga dan terug naar stap 1 van het vervangingsproces.

4. Druk op de menuknop  (linksboven) om het selectiemenu voor geheugenoverdracht te openen. Selecteer de aangesloten USB-stick op het scherm.




OPMERKING: Het kan even duren voordat de USB-stick verschijnt. Als de USB-stick na 15 seconden niet verschijnt, controleer de aansluitingen van de USB-stick en de downloadkabel.

5. Na deze stap moeten de stappen 6-8 binnen de volgende 30 seconden worden voltooid. Lees stap 6-8 en zorg dat u deze hebt begrepen voordat u verder gaat.

Houd de aan-uitknop van de nieuwe SP-BLE ongeveer 12 seconden lang ingedrukt totdat de batterijlampjes doven en de blauwe led snel begint te knippen.


6. Zoek en selecteer het nieuwe configuratiebestand.

OPMERKING: Het configuratiebestand is een .bin-bestandstype, dat het nieuwe serienummer van de SP-BLE als naam heeft (voorbeeld: 117717711.bin).

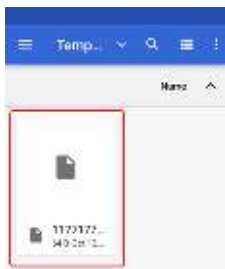

- Als na het selecteren de melding 'Unable to change configuration' ('Kan configuratie niet wijzigen') verschijnt, selecteer het configuratiebestand dan opnieuw om er zeker van te zijn dat dit het juiste bestand is. Neem contact op met Nonin als deze fout zich blijft voordoen.
- Als na het selecteren de melding 'Configuration accepted' ('Configuratie geaccepteerd') verschijnt, kunt u doorgaan naar de volgende stap.

7. De D-HH begint automatisch verbinding te maken met de nieuwe SP-BLE. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, drukt u op PAIR & CONNECT (koppelen en verbinden) om het koppelingsverzoek te bevestigen.

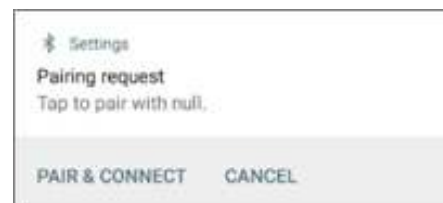


OPMERKING: Als de D-HH geen verbinding kan maken met de nieuwe SP-BLE, zal de D-HH een verbindingfout vertonen. Zorg dat de nieuwe SP-BLE is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de D-HH bevindt. Druk twee keer op de aan-uitknop op de D-HH om hem in de slaapstand te zetten en zet hem weer aan. Hierdoor wordt het verbindingproces opnieuw opgestart.



OPMERKING: Als de D-HH een COM-02-fout vertoont, betekent dit dat de nieuwe SP-BLE geen toestemming verleent om te koppelen met de D-HH. Doe het volgende:

- Schakel de SP-BLE uit door de aan-uitknop minstens 3 seconden ingedrukt te houden.
- Herhaal stap 5 om de SP-BLE in de koppelingsmodus te zetten.
- Druk twee keer op de aan-uitknop op de D-HH om hem in de slaapstand te zetten en zet hem weer aan. Hierdoor wordt het verbindingproces opnieuw opgestart.
- Ga terug naar stap 7.

8. Druk op PAIR (koppelen) om het koppelingsproces te bevestigen.

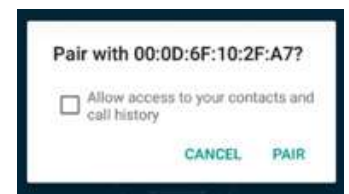

9. De vervanging van de SP-BLE is voltooid. We raden aan voor gebruik te controleren of de nieuwe SP-BLE is opgeladen.