


CO-Pilot™

SP-BLE-vaihto-ohjeet



Tämä asiakirja sisältää tietoja ja ohjeita siitä, miten CO-Pilot-järjestelmän SP-BLE vaihdetaan kentällä. Näitä ohjeita saa käyttää vain SP-BLE-sarjan kanssa vaurioituneen, kadonneen tai toimimattoman SP-BLE-sarjan vaihtamiseen.

HUOMIO: Vaihtoprosessia ei voi peruuttaa palauttamatta asianomaisia järjestelmiä Noninille huoltoa varten. Varmista, että kyseessä olevalla D-HH:lla suoritetaan seuraavat vaiheet.

 Tietoja järjestelmän toiminnasta saat tutustumalla CO-Pilot-järjestelmän käyttöoppaaseen.

Tarvittavat laitteet:

Käytettävissä olevat laitteet

- D-HH: liitetään uuteen SP-BLE:hen
- SP-BLE (vanha): vaihdetaan (ei vaadita, jos kadonnut)



D-HH



SP-BLE

SP-BLE-vaihtosarja

- SP-BLE (uusi): liitetään olemassa olevaan D-HH:hon
- Latauskaapeli
- USB-muistitikku: sisältää uuden asetustiedoston



SP-BLE



Latauskaapeli



USB-
muistitikku

Valmistelu

1. Jos sinulla on vanha SP-BLE, varmista, että se on pois päältä.


HUOMAUTUS: jos valot vilkkuvat, sammuta virta pitämällä virtapainiketta painettuna.

2. Varmista, että uusi SP-BLE ei ole päällä.

HUOMAUTUS: jos valot vilkkuvat, sammuta virta pitämällä virtapainiketta painettuna.

3. Tunnista D-HH, joka liitetään uuteen SP-BLE:hen.

HUOMAUTUS: tämä voidaan vahvistaa vertaamalla vanhan SP-BLE:n sarjanumeroa D-HH:ssa käynnistyksen aikana näkyvään SP-BLE-sarjanumeroon.

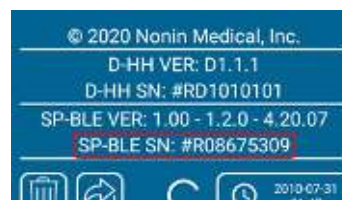

4. Yhdistä mukana toimitettu USB-muistitikku mukana toimitettuun latauskaapeliin. Yhdistä latauskaapeli D-HH-yksikköön, joka yhdistetään uuteen SP-BLE-yksikköön.



Noninin tekninen tuki


Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka sekä Aasia ja Tyynimeri:

Maksuton numero: (800) 356 8874 (vain USA ja Kanada)
Puhelin: +1 (763) 553 9968

Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka ja Intia:

Puhelin: +31 (0)13 45 87 130


Vaihtoprosessi:

1. Kytke D-HH päälle painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä File Transfer (Tiedoston siirto) -painiketta  painettuna, kunnes valintaikkuna tulee näkyviin.



3. Paina New Configuration (Uudet asetukset) -vaihtoehtoa valintaikkunan valikosta. Tiedoston valintavalikko tulee näkyviin.

HUOMAUTUS: Jos näytön alareunassa on SELECT (VALITSE) -vaihtoehto, se ei ole oikein. Paina paluupainiketta palataksesi CO-Pilot-käynnistysnäyttöön, paina D-HH-yksikön virtapainiketta laittaaksesi sen lepotilaan ja palaa sitten vaihtoprosessin vaiheeseen 1.

4. Paina valikkopainiketta  (ylhäällä vasemmalla) avataksesi muistinsiirron valintavalikon. Valitse yhdistetty muistitikku näytöltä.



HUOMAUTUS: USB-muistitikon ilmestymiseen voi mennä hetki. Jos se ei näy 15 sekunnin kuluttua, tarkista USB-muistitikon ja latauskaapelin liitokset.

5. Tämän vaiheen jälkeen vaiheet 6–8 on suoritettava seuraavien 30 sekunnin kuluessa. Lue ja varmista, että ymmärrät vaiheet 6–8 ennen kuin jatkat.

Paina ja pidä painettuna uuden SP-BLE:n virtapainiketta noin 12 sekunnin ajan, kunnes akun valot sammuvat ja sininen LED alkaa vilkkua nopeasti.


6. Etsi ja valitse uusi asetustiedosto.

HUOMAUTUS: asetustiedosto on .bin-tiedostotyyppi, joka on nimetty uuden SP-BLE:n sarjanumerolla (esimerkki: 117717711.bin).



- Kun valinta on tehty, jos teksti "Unable to change configuration" (Asetuksia ei voida muuttaa) tulee näkyviin, valitse asetustiedosto uudelleen ja varmista, että se on oikea tiedosto. Jos tämä virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä Noniniin.
- Kun valinta on tehty, jos teksti "Configuration Accepted" (Asetukset hyväksytyt) tulee näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.

7. D-HH kytkeytyy automaattisesti uuteen SP-BLE:hen. Kun yhteys on muodostettu, paina PAIR & CONNECT (MUODOSTA LAITEPARI JA YHDISTÄ) vahvistaaksesi pariiliitospyynnön.

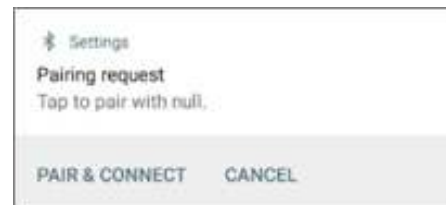


HUOMAUTUS: Jos D-HH ei pysty muodostamaan yhteyttä uuteen SP-BLE:hen, D-HH ilmoittaa yhteysvirheestä. Varmista, että uusi SP-BLE on kytketty päälle ja D-HH-yksikön kantama-alueella. Paina D-HH-yksikön virtapainiketta kahdesti laittaaksesi sen lepotilaan ja kytkeäksesi sen takaisin päälle, tämä käynnistää yhteyden uudelleen.



HUOMAUTUS: Jos D-HH näyttää COM-02-virhettä, se tarkoittaa, että uusi SP-BLE ei salli liittämistä D-HH-yksikköön. Suorita seuraavat toimenpiteet:

- Sammuta SP-BLE pitämällä virtapainiketta painettuna vähintään 3 sekunnin ajan.
- Toista vaihe 5 asettaaksesi SP-BLE:n laiteparin muodostustilaan.
- Paina D-HH-yksikön virtapainiketta kahdesti laittaaksesi sen lepotilaan ja kytkeäksesi sen takaisin päälle, tämä käynnistää yhteyden uudelleen.
- Palaa vaiheeseen 7.

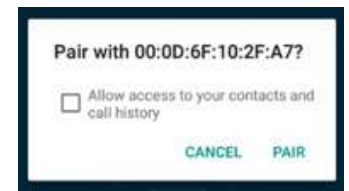

8. Vahvista pariiliitos painamalla PAIR (MUODOSTA LAITEPARI).

9. SP-BLE:n vaihto on valmis. On suositeltavaa varmistaa, että uusi SP-BLE on ladattu ennen käyttöä.