



Kurzanleitung zum Modell 7500

BENUTZERDEFINIERTEN STANDARD-EINSTELLUNGEN

PATIENTENSICHERHEITSMODUS EINSTELLEN

DATENERFASSUNG UND DOWNLOAD

ARBEITSSPEICHER LÖSCHEN

- Das Gerät einschalten – Die unten aufgeführten werkseitigen Einstellungen überprüfen.
- Mit der Taste GRENZWERTE ALLE Einstellungen durchlaufen.
- Die gewünschten Einstellungen mit der Taste oder ändern.
- Nach jeder Einstellung MUSS die Taste GRENZWERTE gedrückt werden, um die Eingabe zu bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortzufahren.
- Zum zweiten Symbol (=Minuten) am Ende der Option Einstellungen blättern und die Taste GRENZWERTE drücken.
- Die neuen Einstellungen werden vom Gerät automatisch geprüft.
- EINSTELLUNGEN SPEICHERN – Die Taste ALARMSTUMMSCHALTUNG gedrückt halten und gleichzeitig kurz die Taste GRENZWERTE drücken – „dEF On“ blinkt.

Auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen

Hinweis: Beim Rücksetzen auf die werkseitigen Einstellungen gehen die benutzerdefinierten Einstellungen verloren.

- Das Gerät einschalten – „dEF On“ wird eingeblendet.
- Die Taste ALARMSTUMMSCHALTUNG gedrückt halten und gleichzeitig kurz die Taste drücken – „dEF OFF“ blinkt.
- Den NETZSCHALTER drücken, bis sich das Gerät ausschaltet. Dann das Gerät wieder einschalten.

Werkseitige Standardeinstellungen

Beim Modell 7500 sind die rechts aufgeführten Werte bereits programmiert. Der Patientensicherheitsmodus ist standardmäßig DEAKTIVIERT, bis er eingeschaltet wird.

SCHLÜSSEL	Parameter	Werkseitige Einstellung	Einstellungsoptionen	Stufen
	Untere SpO ₂ -Alarmgrenze	85 %	Aus, 50-95	1 %
	Obere Herzfrequenz-Alarmgrenze	200 Schläge/Min.	Aus, 75-275	5 Schläge/Min
	Untere Herzfrequenz-Alarmgrenze	50 Schläge/Min.	Aus, 30-110	5 Schläge/Min
	Obere SpO ₂ -Alarmgrenze	Aus	Aus, 80-100	1 %
	Alarmlautstärke	Hoch	Aus, Niedrig, Hoch	Nicht zutr.
	Oximetrie-Mittelung	Nein	Ja, Nein	Nicht zutr.

- Das Gerät einschalten – Die unten aufgeführten werkseitigen Einstellungen überprüfen.
- Mit der Taste GRENZWERTE ALLE Einstellungen durchlaufen.
- Die gewünschten Einstellungen mit der Taste oder ändern.
- Nach jeder Einstellung MUSS die Taste GRENZWERTE gedrückt werden.
- Zum zweiten Symbol (=Minuten) am Ende der Option Einstellungen blättern und die Taste GRENZWERTE drücken.
- Die neuen Einstellungen werden vom Gerät automatisch geprüft.
- EINSTELLUNGEN SPEICHERN – Die Taste ALARMSTUMMSCHALTUNG gedrückt halten und gleichzeitig kurz die Taste GRENZWERTE drücken – „dEF On“ blinkt
- Den NETZSCHALTER drücken, bis sich das Gerät ausschaltet.
- EINSTELLEN – Die Taste ALARMSTUMMSCHALTUNG gedrückt halten und gleichzeitig das Gerät wieder einschalten.
- Auf der Anzeige blinkt „SEC On“

Hinweis: Die Einstellung des „Unteren O₂“ Alarmgrenzwerts auf 85 % muss zuerst in den Benutzerdefinierten Standardeinstellungen erfolgen. Dann die o. g. Schritte durchführen.

Patientensicherheitsmodus ausschalten

- Den NETZSCHALTER drücken, bis sich das Gerät ausschaltet.
- Die Tasten ALARMSTUMMSCHALTUNG und GRENZWERTE gedrückt halten und dann den NETZSCHALTER drücken.
- Auf der Geräteanzeige erscheint die Meldung „SEC OFF“

Datenerfassung

- Das Gerät einschalten – Die Aufzeichnung wird automatisch gestartet.

Hinweis: Datenerfassungen unter 1 Minute werden nicht gespeichert.

Daten auf einen PC herunterladen

Hinweis: Der Patientensicherheitsmodus muss DEAKTIVIERT sein.


- Den NETZSCHALTER drücken, bis sich das Gerät ausschaltet.
- Das Gerät mit dem 7500SC Downloadkabel am PC anschließen.
- nVISION starten und dann die Option DATEI>Neue Datenerfassung wählen. Anschließend auf die Option 7500 Oximeter klicken.
- Am 7500 Gerät die Taste und den NETZSCHALTER gedrückt halten - während des Downloads zeigt das Gerät die Meldung „PLA bAC“.
- Nach dem Download kehrt das Gerät in den normalen Betriebsmodus zurück.

- Das Gerät einschalten .

Hinweis: Der Patientensicherheitsmodus muss DEAKTIVIERT sein.

- Die Taste GRENZWERTE drücken, bis die Meldung „Clr no“ angezeigt wird.
- Die Taste drücken, bis die Meldung „Clr YES“ erscheint.
- Die Taste GRENZWERTE zur Bestätigung drücken.
- Die Meldung „dEL no“ erscheint. Die Taste drücken, um die Meldung „dEL YES“ anzuzeigen.
- Die Taste GRENZWERTE zur Bestätigung drücken.
- „dne CLR“ bestätigt, dass der Speicher gelöscht wurde.

Vollständige Angaben sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

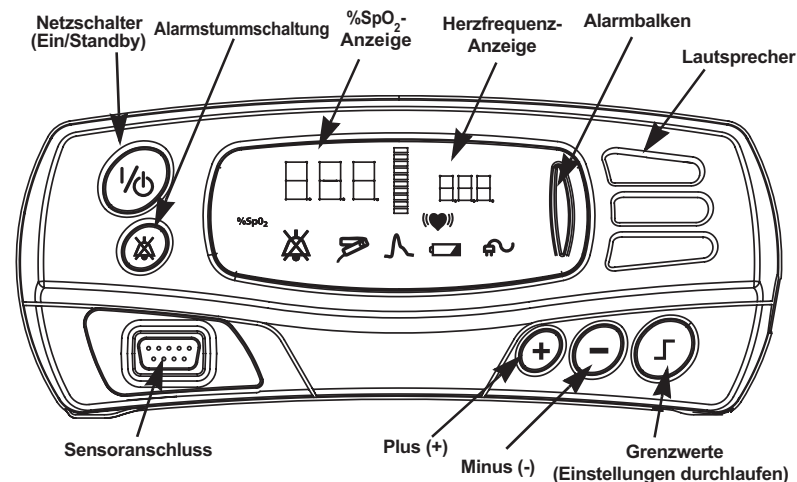



<https://www.nonin.com/support/7500/>

EN: Translations of this quick start guide can be found using this QR code or on the USB for the Model 7500 operator's manual.

FR: Les traductions de ce guide de démarrage rapide sont accessibles à l'aide de ce code QR ou sur la clé USB contenant le manuel de l'opérateur du modèle 7500.

DE: Übersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie über diesen QR-Code oder auf dem USB für die Bedienungsanleitung des Modells 7500.

IT: Le traduzioni di questa guida rapida sono reperibili utilizzando questo codice QR o sull'USB per il Manuale dell'operatore del modello 7500.

ES: Las traducciones de esta guía de inicio rápido se pueden encontrar mediante este código QR o en la unidad USB para el manual del operador del modelo 7500.

PT: Vertalings van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via deze QR-code of op de USB-stick.

NL: Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via deze QR-code of op de USB-stick.

EL: Μπορείτε να βρείτε μεταφράσεις του εγχειριδίου χειριστή για το Μοντέλο 7500 χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό QR ή στη μονάδα USB.

DA: Oversættelser af brugervejledningen for Model 7500 findes ved hjælp af denne QR-kode eller på USB-drevet.

SV: Översättningar av driftsmanualen för modell 7500 hämtas med hjälp av QR-koden eller på USB-drivenheten.

FI: Mallin 7500 käyttöoppaan käänökset löytyvät käyttämällä tätä QR-koodia tai USB-tikulta.

PO: Dostęp do tłumaczeń instrukcji użytkowania modelu 7500 można uzyskać za pomocą niniejszego kodu QR lub korzystając z nośnika USB.

NO: Oversettelser av bruksanvisningen til Model 7500 finner du ved hjelp av QR-koden eller på minnepennen.

Modell 7500

Kurzanleitung

