



Guida di avviamento rapido del modello 7500

IMPOSTAZIONE DEI VALORI DELL'UTENTE

ATTIVAZIONE MODALITÀ DI SICUREZZA PAZIENTE

RACCOLTA E SCARICAMENTO DATI

AZZERAMENTO MEMORIA

1. Accendere l'unità – Rivedere le impostazioni di fabbrica, come indicato di seguito.
2. Scorrere TUTTE le impostazioni usando il pulsante LIMITI .
3. Cambiare le impostazioni secondo la necessità usando i pulsanti o .
4. Per confermare e continuare, dopo ogni impostazione è NECESSARIO premere il pulsante LIMITI .
5. Scorrere fino al secondo simbolo dell'ultima impostazione (= minuti) e premere il pulsante LIMITI .
6. L'unità elenca automaticamente le nuove impostazioni.
7. SALVATAGGIO IMPOSTAZIONI – Tenere premuto il pulsante SILENZIAMENTO ALLARMI mentre si preme il pulsante LIMITI – “dEF On” lampeggia.

Ripristino dei valori di fabbrica

Nota – Quando si riattivano i valori di fabbrica, si perdono le impostazioni definite dall'utente.

1. Accendere l'unità – Compare “dEF On”.
2. Tenendo premuto il pulsante SILENZIAMENTO ALLARMI , premere brevemente il pulsante – “dEF Off” lampeggia.
3. Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE per spegnere l'unità, quindi riaccenderla.

Impostazioni definite in fabbrica

Il modello 7500 viene fornito con i valori indicati a destra. La modalità di sicurezza del paziente è disattiva, a meno che non venga attivata.

Codice	Parametro	Impostazione di fabbrica	Valori disponibili	Incrementi
02L	Limite minimo dell'allarme di SpO ₂	85%	Off, 50-95	1 %
H H	Limite massimo dell'allarme di frequenza del polso	200 BPM	Off, 75-275	5 BPM
H L	Limite minimo dell'allarme di frequenza del polso	50 BPM	Off, 30-110	5 BPM
02H	Limite massimo dell'allarme di SpO ₂	Off	Off, 80-100	1 %
R d b	Volume allarmi	Alto	Off, basso, alto	N.p.
H y b	Media dell'ossimetria	No	Si, No	N.p.

1. Accendere l'unità – Rivedere le impostazioni di fabbrica, come indicato di seguito.
2. Scorrere TUTTE le impostazioni usando il pulsante LIMITI .
3. Cambiare le impostazioni secondo la necessità usando i pulsanti o .
4. Dopo ogni impostazione è NECESSARIO premere il pulsante LIMITI .
5. Scorrere fino al secondo simbolo dell'ultima impostazione (= minuti) e premere il pulsante LIMITI .
6. L'unità elenca automaticamente le nuove impostazioni.
7. SALVATAGGIO IMPOSTAZIONI – Tenere premuto il pulsante SILENZIAMENTO ALLARMI mentre si preme il pulsante LIMITI – “dEF On” lampeggia.
8. Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE per spegnere l'unità.
9. IMPOSTAZIONE – Tenere premuto il pulsante SILENZIAMENTO ALLARMI mentre si riaccende l'unità.
10. “SEC On” lampeggia sullo schermo.

Nota – Per impostare l'allarme “O₂ basso” sotto l'85%, bisogna prima definire i valori dell'utente e poi seguire i passaggi qui sopra.

Disattivazione della modalità di sicurezza del paziente

1. Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE per spegnere l'unità.
2. Contemporaneamente, tenere premuti i pulsanti SILENZIAMENTO ALLARMI , poi LIMITI e quindi ALIMENTAZIONE .
3. L'unità indica “SEC OFF”.

Raccolta dei dati

1. Accendere l'unità – La registrazione inizia automaticamente.

Nota – I dati di durata inferiore a 1 minuto non vengono salvati.

Scaricamento dei dati sul PC

Nota – La modalità di sicurezza del paziente deve essere disattiva.


1. Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE per spegnere l'unità.
2. Collegare l'unità al PC con il cavo di scaricamento 7500SC.
3. Avviare nVISION, selezionare FILE>Acquisizione nuovi dati e fare clic sull'opzione Ossimetro 7500.
4. Sul modello 7500, tenere premuti i pulsanti e di ALIMENTAZIONE – Durante lo scaricamento, il display visualizza “PLA bAC”.
5. Dopo lo scaricamento, l'unità torna alla normale modalità operativa.

1. Accendere l'unità .

Nota – La modalità di sicurezza del paziente deve essere disattiva.

2. Tenere premuto il pulsante LIMITI fino a visualizzare “CLr no”.
3. Tenere premuto il pulsante fino a visualizzare “CLr YES”.
4. Premere il pulsante LIMITI per confermare.
5. Compare “dEL no”; premere il pulsante per visualizzare “dEL YES”.
6. Premere il pulsante LIMITI per confermare.
7. “dnE CLr” conferma che la memoria è stata azzerata.

Per le specifiche complete, consultare il Manuale d'uso.

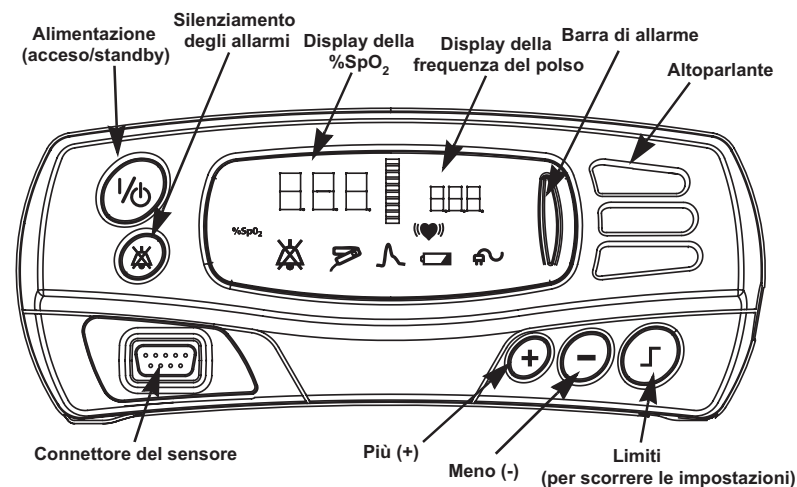



<https://www.nonin.com/support/7500/>

EN: Translations of this quick start guide can be found using this QR code or on the USB for the Model 7500 operator's manual.

FR: Les traductions de ce guide de démarrage rapide sont accessibles à l'aide de ce code QR ou sur la clé USB contenant le manuel de l'opérateur du modèle 7500.

DE: Übersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie über diesen QR-Code oder auf dem USB für die Bedienungsanleitung des Modells 7500.

IT: Le traduzioni di questa guida rapida sono reperibili utilizzando questo codice QR o sull'USB per il Manuale dell'operatore del modello 7500.

ES: Las traducciones de esta guía de inicio rápido se pueden encontrar mediante este código QR o en la unidad USB para el manual del operador del modelo 7500.

PT: Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via deze QR-code of op de USB-stick.

NL: Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via deze QR-code of op de USB-stick.

EL: Μπορείτε να βρείτε μεταφράσεις του εγχειριδίου χειριστή για το Μοντέλο 7500 χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό QR ή στη μονάδα USB.

DA: Oversættelser af brugervejledningen for Model 7500 findes ved hjælp af denne QR-kode eller på USB-drevet.

SV: Översättningar av driftsmanualen för modell 7500 hämtas med hjälp av QR-koden eller på USB-drivenheten.

FI: Mallin 7500 käyttöoppaan käännökset löytyvät käyttämällä tätä QR-koodia tai USB-tikulta.

PO: Dostęp do tłumaczeń instrukcji użytkowania modelu 7500 można uzyskać za pomocą niniejszego kodu QR lub korzystając z nośnika USB.

NO: Oversettelser av bruksanvisningen til Model 7500 finner du ved hjelp av QR-koden eller på minnepennen.

Modello 7500

Guida di avviamento rapido

