

Modèle 8000JFW

FlexiWrap® pour adulte


Bande de capteur adhésive jetable pour un seul patient



1. Saisissez la languette bleue de la bande FlexiWrap et décollez la protection en papier juste assez pour permettre la fixation du capteur de flexion. Placez la bande côté imprimé vers le bas sur la table.




2. Positionnez le capteur de flexion dans les découpes sur le côté adhésif de la bande, comme illustré. Pressez le capteur fermement sur l'adhésif et retirez complètement la protection en papier.

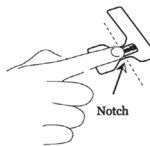


3. Placez le bout du doigt entre les encoches de la bande FlexiWrap.



4. Rabattez les rabats latérales de la bande FlexiWrap sur les côtés du doigt. Tirez la bande FlexiWrap avec le capteur sur le bout du doigt et collez la bande sur le dessus et le côté du doigt.

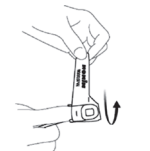

5. Rabattez le long rabat de la bande FlexiWrap sur tout le pourtour du doigt. Assurez-vous que le bandage n'est pas trop serré, pour ne pas gêner la circulation sanguine.

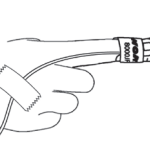

6. Pour obtenir les meilleurs résultats, fixez le câble du capteur indépendamment du capteur avec du sparadrap, de préférence autour de la base du doigt. Assurez-vous que le sparadrap ne gêne pas la circulation sanguine.

Utilisation indiquée

Utilisez le modèle 8000JFW de FlexiWrap pour attacher le modèle 8000J du capteur de flexion pour adulte NONIN. Le capteur réutilisable 8000J est destiné aux adultes pesant plus de 20 kg (44 lb).

REMARQUE : Ne jetez PAS le capteur réutilisable. Jetez uniquement la bande adhésive.


Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, MN • 55441-5443 • États-Unis
Tél. : +1 763 553 9968 1 800 356 8874
Fax : +1 763 577 5521
E-mail : info@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Prins Hendriklaan 26
1075 BD Amsterdam, • Pays-Bas
Tél. : +31 (0)13-79 99 040
Fax : +31 (0)13-79 99 042
E-mail : infointl@nonin.com


Modèle 8008JFW

FlexiWrap® pour nourrisson

Bande de capteur adhésive jetable pour un seul patient

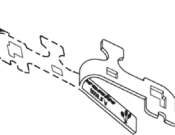


1. Saisissez la languette bleue et décollez la protection en papier du côté adhésif.

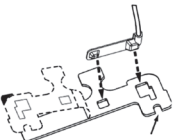

2. Localisez les découpes et placez le capteur sur le côté adhésif exposé.



3. Placez sur le gros orteil (adhésif vers l'orteil) de sorte que la ligne en pointillé soit positionnée sur le côté de l'orteil.

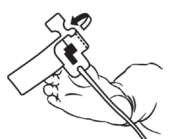

4. Enroulez le sparadrap autour de l'orteil et assurez-vous que les découpes sont opposées.



5. Enroulez le sparadrap restant autour de l'orteil.



6. Fixez le câble du capteur indépendamment du capteur le long du bas du pied vers le talon.


Utilisation indiquée

Utilisez le modèle 8008JFW de FlexiWrap pour attacher le modèle 8008J du capteur de flexion pour nourrisson NONIN. Le capteur 8008J réutilisable est destiné aux nourrissons pesant de 2 à 22 kg (4 à 44 lb).


Modèle 8001JFW

FlexiWrap® pour nouveau-né

Bande de capteur adhésive jetable pour un seul patient

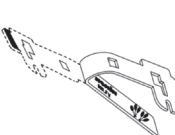


1. Saisissez la languette bleue et décollez la protection en papier du côté adhésif.

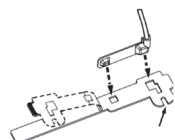

2. Localisez les découpes et placez le capteur sur le côté adhésif exposé.



3. Placez sur le pied à la base des orteils (adhésif vers le pied) de sorte que la ligne pointillée soit positionnée sur le côté du pied.

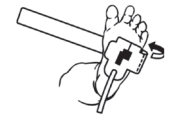

4. Enroulez le sparadrap autour du pied et assurez-vous que les découpes sont opposées.



5. Enroulez le sparadrap restant autour du pied.



6. Fixez le câble du capteur indépendamment du capteur le long du bas du pied vers le talon.

Utilisation indiquée

Utilisez le modèle 8001JFW de FlexiWrap pour attacher le modèle 8001J du capteur de flexion pour nouveau-né NONIN. Le capteur 8001J réutilisable est destiné aux nouveau-nés pesant moins de 2 kg (4 lb).



DES QUESTIONS ? Contactez le service client NONIN à l'adresse suivante : customer.support@nonin.com 1.800.356.8874 ou +1.763.553.9968